

お得意先様各位

カイゲンファーマ株式会社

大阪市中央区道修町二丁目5番14号

軟性内視鏡用洗浄消毒器「クリーントップ WM-S/WM-SII」用
『内視鏡バスケットセット（メッシュ）』に関するご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

先般より、富士フイルム株式会社様から発売されております消化管用内視鏡『レザリオシリーズ』等をより簡便にクリーントップ WM-S/WM-SIIへセットできるよう、付属品「内視鏡バスケットセット（メッシュ）」を供給しております。


これを使用した内視鏡のセット方法（置き方）につきまして、従来案内しておりました方法では、セットする際の取扱いや最終的なセット形状ごとの誤差等により、特定箇所に負荷がかかり内視鏡管路等を傷める原因となる場合があることや、コネクター部の置き場所によって金具部分との接触により、内視鏡表面を傷つける可能性も考えられましたことから、下記のとおり新たなセット方法（2パターン）をご案内申し上げます。

なお当該セット方法にて、内視鏡の洗浄消毒効果に問題がないことを確認済みです。

当該変更にあたってはお手間をお掛けするかと存じますが、何卒ご理解を賜りますとともに、今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

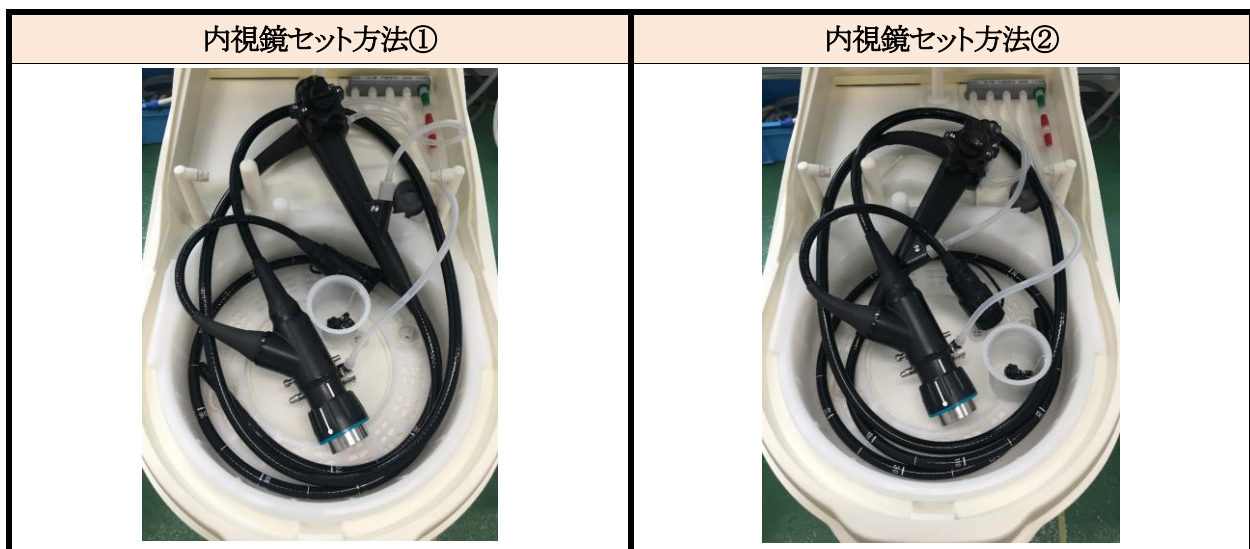

※上記いずれの方法を選択いただいても構いません。内視鏡の巻き癖等に合わせてご選択ください。
※内視鏡セット方法の概要（イメージ）並びに諸注意につきまして、別紙もご確認ください。

以上

内視鏡セット方法① 概要 (イメージ)

コード等が消毒槽上隅部に行き過ぎないこと。


当該部に金属アダプターがある機種の場合、コードと金具部分が接触しないこと。

チューブが折れない (つぶれない) よう注意すること。
アタッチメントの外れに注意すること。

コード根本部を屈曲させすぎないこと。(写真程度に収めること)

金具部分が挿入部やコードに接触しないこと。
同部がバスケットの高さより上にならないこと。(同部が全て浸漬すること)

トップカバーでコードを噛み込まないように注意すること。

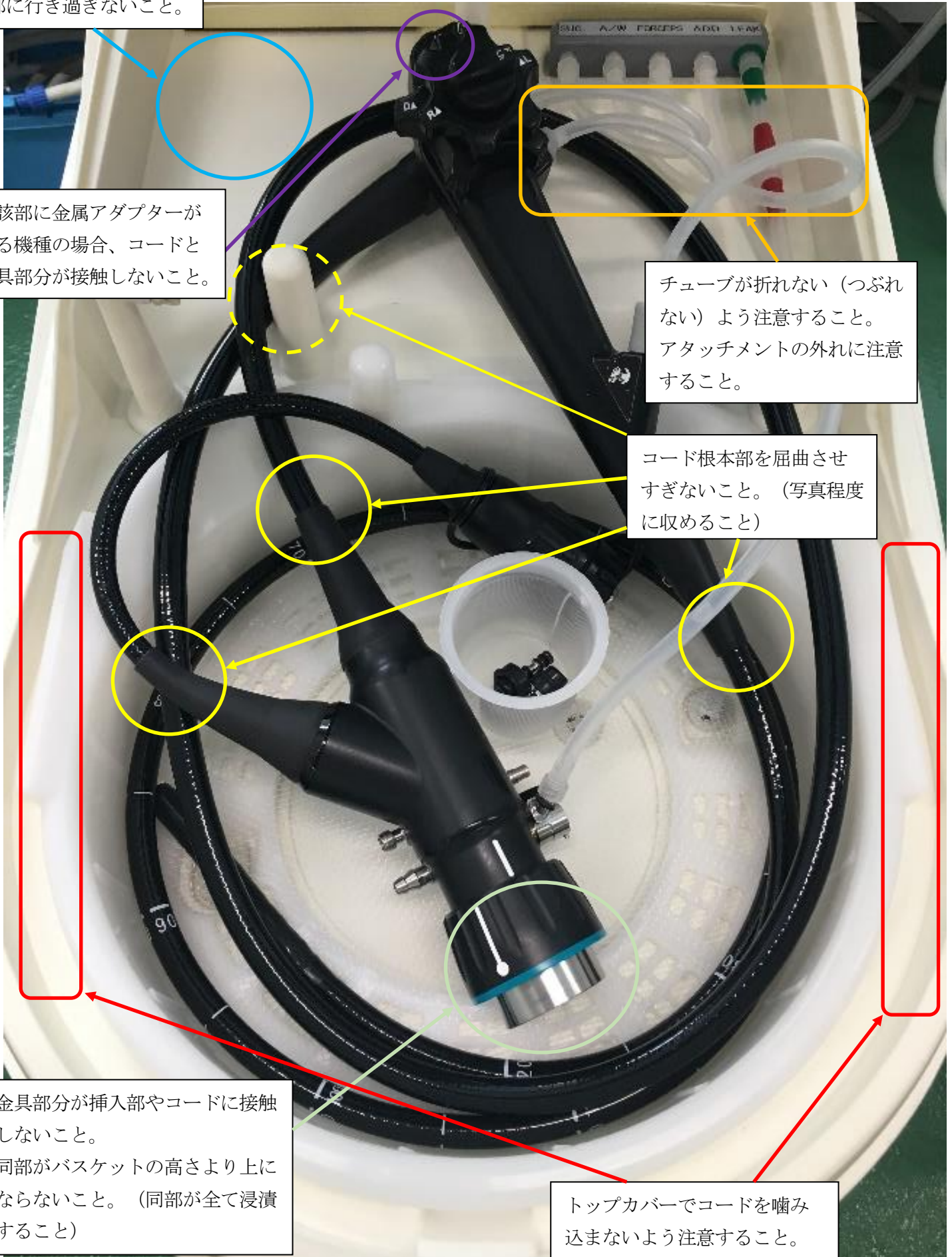

内視鏡セット方法② 概要 (イメージ)

コード等が消毒槽上隅部に行き過ぎないこと。

チューブが折れない (つぶれない) よう注意すること。
アタッチメントの外れに注意すること。

当該部に金属アダプターがある機種の場合、コードと金具部分が接触しないこと。

コード根本部を屈曲させすぎないこと。(写真程度に収めること)

金具部分が挿入部やコードに接触しないこと。
同部がバスケットの高さより上にならないこと。(同部が全て浸漬すること)

トップカバーでコードを噛み込まないように注意すること。

