



## 【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

- ・チューブを潰したり、折り曲げたりしないこと。  
[チューブが破損し、内針の突出および収納異常、薬液注入不良等が起こるおそれがある。]
- ・使用前または使用中にチューブの潰れや折れ曲がり(キンク)、内針の曲がりや折れ等の異常、突出操作がスムーズに行えない場合は使用を中止すること。  
[無理に操作すると、急激な内針の突出による穿孔、出血、粘膜損傷、組織の炎症や内視鏡の破損等につながるおそれがある。]
- ・内針による針刺し事故には十分注意すること。使用時以外は確実にスライダーを引き、内針を完全に収納すること。  
[血液を介した交差感染につながるおそれがある。]

### 2. 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

#### 1) 医薬品との併用注意

- ・本品の端子にはABS樹脂を使用しており、油性造影剤やエタノールの注入に際し、端子のひび割れについて注意すること。  
[薬液により端子にひび割れが生じ、薬液漏れ、空気混入等のおそれがある。また、注入用シリンジ接続時の過度の締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]

### 3. 不具合・有害事象

本品の使用に伴い、以下の不具合・有害事象が発生する可能性がある。

#### 1) 不具合

- ・本品及び内視鏡の破損
- ・チューブの潰れ、折れ曲がり(キンク)、破断
- ・内針の曲がり、折れ
- ・薬液漏れ
- ・内針の突出不良、収納困難
- ・シリンジとの嵌合不良、薬液注入不良
- ・チューブの抜去困難

#### 2) 有害事象

- ・出血
- ・穿孔
- ・破損部品の体内残留
- ・拒絶反応
- ・組織及び粘膜の損傷
- ・感染症
- ・発熱

## 【保管方法及び有効期間等】

### 1. 保管方法

- ・水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管してください。

### 2. 使用期間

- ・箱の使用期限欄を参照してください。  
(自己認証(当社データ)による)

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:ミサワ医科工業株式会社  
茨城県笠間市旭町351  
電話番号 0296-77-8649

## ＜製品に関する問い合わせ＞

カイゲンファーマ株式会社 信頼性保証部 お客様相談室  
電話番号:06-6202-8975  
(受付時間:平日午前9時～午後5時)