

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

輸液用延長チューブ

JMDN 12170001

一般医療機器

## エネマチューブ

### 再使用禁止


#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、主管及びU字管、又は主管単体よりなる延長チューブで、継手付キャップが付属している。

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。

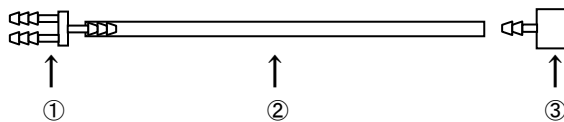

①U字管（アクリルニトリル・ブタジエン・スチレン）

②主管（ポリ塩化ビニル）

③継手付キャップ（ポリプロピレン）

#### 【使用目的又は効果】

本品は、注腸X線検査の際に、カテーテルと造影剤容器の間のラインを延長するために用いるチューブである。

#### 【使用方法等】

1. 滅菌バッグを開封後、本品を取り出す。
2. 造影剤容器のキャップを継手付キャップに取り替える。
3. 本品を継手付キャップに差し込む。
4. U字管をカテーテルに差し込む。

\*\*5. 自動注腸機に正しくセットする。

#### 【使用上の注意】

##### <重要な基本的注意>

1. 体動等でねじれたり折れ曲がったりして本品が閉塞する可能性があるため、本品の固定方法に注意して使用すること。
2. 本品は、エチレンオキサイド滅菌済みにつき、包装開封後、直ちに、1回限りの使用とし、再滅菌、再使用はしないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
室温にて保管すること。  
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間等  
製造日より3年間。  
包装に表示された滅菌有効期限を確認すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 製造販売元

#### バイリーン クリエイト株式会社

〒104-0045

東京都中央区築地五丁目6番4号

電話番号：03-4546-1183

##### 製造業者

ニチエー株式会社

##### \*発売元

#### カイゲンファーマ株式会社

〒541-0045

大阪府大阪市中央区道修町二丁目5番14号

電話番号：06-6202-8975