

機械器具（25）医療用鏡  
一般医療機器 自然開口向け内視鏡用くもり止め JMDN 70176000

# KSレンズコート

## 【形状・構造及び原理等】

### 1. 形状

本品は無色～白色の溶液である（内容量：10mL）。

製品写真



## 【保管方法及び有効期間等】

### <保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿、低温を避けて、清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：カイゲンファーマ株式会社

大阪市中央区道修町二丁目5番14号

TEL：06-6202-8975

FAX：06-6202-0872

### 2. 組成：水、エタノール、界面活性剤、防腐剤

### 3. 原理

本品を内視鏡のレンズ面上に塗布することにより、レンズ面上に無色透明な被膜を形成して結露を防止する。

## 【使用目的又は効果】

自然開口部より挿入される内視鏡のレンズ面上に塗布して使用する。

内視鏡と体内温度差により発生する結露を防止する。

## 【使用方法等】

- 1) 本品のキャップをあげ、1～2滴内視鏡のレンズ面に滴下し、乾燥した清潔なガーゼで拭取る。
- 2) 必要に応じて1)の操作を繰り返す。
- 3) 使用しないときは、キャップを閉じておく。

### <使用方法等に関連する使用上の注意>

すべての操作は汚染防止に十分な配慮をしたうえで行うこと。また、低温状態になると白濁することがあるが、室温に戻すと元に戻り、品質等には影響を及ぼさない。

## 【使用上の注意】

### <重要な基本的注意>

本品がこぼれて目や皮膚に触れた場合は、直ちに清潔な水で洗浄すること。万一異常を感じたら速やかに医師の診察を受けること。